



## Péče o nástroj

Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval nejlepší klinické výsledky a zároveň snesl všeobecně doporučené čisticí a sterilizační postupy. Dodržování následujících opatření může prodloužit životnost vašeho nástroje.

Tento nástroj není sterilní při dodání a musí být sterilizován před použitím.

### **Ultrazvukové čištění před sterilizací.**

S použitými nástroji by mělo být manipulováno za použití rukavic a ochrany očí. Všechny nástroje mohou podléhat poškození během manipulace, nošení a používání.

Vyvarujte se přeplnění, které způsobuje poškození hrotů, rukojetí a snižuje účinnost čištění.

Zamezte nadměrnému čištění.

Dodržujte pokyny pro použití od výrobce přístroje a materiálu. Vizuálně zkontrolujte, zda veškerá nečistota byla odstraněna. Nečistěte barevně značené nástroje v ultrazvukových čističkách.

### **Sterilizace v autoklávu.**

Před sterilizací kleští, peánů, pinzet, nůžek atd. namažte spoj vhodným mazacím olejem.

Tyto nástroje je možné použít zabalené v autoklávu s vakuem. Podnosy na nástroje mohou být vloženy a použity v konvenčních nebo vakuových autoklávech.

### **Desinfekční prostředky užití za tepla**

Nepoužívejte alkalické nebo žíravé čisticí prostředky. Používejte pouze schválené čisticí stroje a vhodné čisticí roztoky. Dodržujte instrukce určené výrobcem přístroje i čisticího prostředku.

### **Studené desinfekční roztoky.**

Nepoužívejte bělicí (chlornan sodný) ani žíravé chemikálie. Tyto mohou způsobit odbarvení a korozi dentálních nástrojů.

### **Horkovzdušná sterilizace.**

Ideální teplota je 160°C. **NIKDY** nesmí překročit 180°C. Nesterilizujte horkým vzduchem nástroje, které k tomu nejsou určeny.

Vyřadte ihned opotřebované, zrezivělé nebo poškozené nástroje.

**Pro více informací kontaktuje prosím naše oddělení péče o zákazníka.**