

## desinfectie- en reinigingsplan voor de tandartspraktijk

volgens de WIP-richtlijn vastgesteld 10-2007

wat	hoe	wanneer	waarmee
	dosering, inwerktijd	frequentie	artikelnummer + product
<b>handhygiëne</b>			
<b>wassen (reinen)</b> Bij zichtbare verontreiniging de handen wassen met zeep. Anders de handen desinfecteren.	Onder stromend water en met vloeibare zeep uit een dispenser, zonder de kraan of dispenser met de handen aan te raken. ± 10 sec. goed wrijven tussen handen en over de polsen. Handen drogen met papieren wegwerp-handdoek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>voor en na elke patiënt</li> <li>na het snuiten van de neus</li> <li>na hoesten en niezen</li> <li>na toiletgang</li> <li>voor het verwerken van gebruiks klaar instrumentarium</li> <li>na het verwerken van gebruikt instrumentarium</li> </ul>	<b>900-2608</b> HS EuroSept® Max waslotion sensitive 1l <b>900-2594</b> HS EuroSept® Max waslotion 1l <b>900-3327</b> HS handdoeken Z-gevouwen 3-laags 42 x 22cm <b>900-3326</b> HS handdoeken Z-gevouwen 3-laags 32 x 22cm
<b>desinfecteren hygienisch</b> Kost minder tijd dan handen wassen en is minder schadelijk voor de huid.	Met dispenser handalcohol aanbrengen op droge handen. Neem een hoeveelheid die het kuiltje van een handpalm vult. Wrijf de handen ± 30 sec. zorgvuldig over elkaar. Vergeet hierbij niet de vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>voor en na elke patiënt</li> <li>na het snuiten van de neus</li> <li>na hoesten en niezen</li> <li>na toiletgang</li> <li>voor het verwerken van gebruiks klaar instrumentarium</li> <li>na het verwerken van gebruikt instrumentarium</li> <li>voor en na elke maaltijd</li> </ul>	
<b>verzorging</b>	Zorgvuldig de hele hand inwrijven, goed de vingers en nagelriemen inmasseren.	eind van de dag	<b>104-5305</b> HS handcreme 110gr

<b>oppervlakken</b>			
<b>grote oppervlakken en vloeren in onderzoek- en behandelkamer</b>	Zoveel mogelijk droog reinigen, zoals met behulp van een stofwisser. Eventuele vervuiling met tissue verwijderen voordat met een desinfectant gedesinfecteerd kan worden. De desinfectant aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>bij zichtbare verontreiniging</li> <li>indien nodig</li> </ul>	<b>900-2092</b> HS EuroSept® Max surface concentrate 5l concentratie van 0,5% aan de lucht laten drogen
<b>kleine oppervlakken behandelstoel, hoekstukken, werkplekken, enz.</b>	Bij zichtbare verontreiniging eerst oppervlak reinigen met water en detergens. Daarna desinfecteren met 70% alcohol of een desinfectant. Gebruik alcoholdoekjes en voor de moeilijk bereikbare plaatsen een sprayflacon met desinfectiemiddel. Vergeet met name niet de handgrepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>na gebruik</li> <li>na elke behandeling</li> <li>bij zichtbare verontreiniging</li> </ul>	<b>desinfectiedoekjes:</b> <b>900-1292</b> HS EuroSept® Max wipes can <b>900-1293</b> HS EuroSept® Max wipes refill  <b>sproeidesinfectie:</b> <b>900-1291</b> HS EuroSept® Max surface 1l <b>900-2089</b> HS EuroSept® Max surface lemon 1l

<b>speciaalreiniging</b>			
<b>afzuigslang (binnenkant) reinigen</b>	Spoel de slangen met ongeveer een halve liter (koud) water door.	na elke behandeling	<b>900-2577</b> HS gedestilleerd water 5l
<b>desinfecteren</b>	Laat de slangen een desinfectie- reinigingsmiddel opzuigen.	1 of 2 keer per dag (middag en avond)	<b>900-1295</b> HS EuroSept® Evac liquid 5l een concentratie van 2%, 30 minuten in laten werken
<b>afzuigslang (buitenkant)</b>	Desinfecteren, reinigen door deze af te nemen met een desinfectiedoek of spraydesinfectie. De spraydesinfectie onverdund gebruiken en 2 minuten laten inwerken. U kunt ook gebruik maken van hygiënehoesjes.	na elke behandeling	<b>desinfectiedoekjes:</b> <b>900-1292</b> HS EuroSept® Max wipes <b>900-1293</b> HS EuroSept® Max wipes refill <b>900-2095</b> HS EuroSept® Max lemon XL wipes <b>sproeidesinfectie:</b> <b>900-1291</b> HS EuroSept® Max surface 1l <b>900-2089</b> HS EuroSept® Max surface lemon 1l <b>100-9860</b> HS hygiënehoesjes 500st
<b>spittoon</b>	Doorspoelen met water en eventuele resten verwijderen. De spittoonreiniger 1 min. laten inwerken (onverdund) en nogmaals doorspoelen.	na elke patiënt	<b>900-2483</b> HS Spittoon cleaner 1l
<b>filter</b>	Filter wisselen/reinigen. Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>na gebruik</li> <li>na verontreiniging</li> </ul>	Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen. <b>900-2389</b> HS Nitrile wit XS <b>900-2388</b> HS Nitrile wit S <b>900-2387</b> HS Nitrile wit M <b>900-2386</b> HS Nitrile wit L <b>900-2385</b> HS Nitrile wit XL
<b>amalgamaafscheider</b>	Vervang de afscheider zodra de unit dit aangeeft of bij twijfel van goed functioneren. Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen.	zodra de afscheider vol is	Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen. <b>101-9924</b> HS Latex poeder vrij wit XS <b>101-8787</b> HS Latex poeder vrij wit S <b>101-3806</b> HS Latex poeder vrij wit M <b>101-0445</b> HS Latex poeder vrij wit L <b>900-1715</b> HS Latex poeder vrij wit XL
<b>afdrukken alginaat, silicone, hydrocolloid, etc.</b>	Reinigen; onder de lopende kraan afspoelen, overmaat water afschudden en aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>direct na het maken van de afdruk</li> <li>klaarmaken voor verzending naar de tand-technieker</li> </ul>	kraanwater
Dit geldt ook voor o.a. prothese, brugwerken, beetregistraties of artikulatoren, gezichtsbogen etc.	Desinfectie en reiniging; afdrukken voor 10 min. in desinfectiemiddel onderdompelen. Na inwerktijd afspoelen onder de kraan, overmaat water afschudden en aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>direct na het maken van de afdruk</li> <li>klaarmaken voor verzending naar de tand-technieker</li> </ul>	<b>900-2098</b> HS EuroSept® Max impression liquid 5l onverdund, 10 min. <b>900-1296</b> HS EuroSept® Max impression disinfection powder 700gr concentratie 2 %, 10 min.
<b>machinaalreinen</b>	Volg handleiding van de fabrikant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>direct na het maken van de afdruk</li> <li>klaarmaken voor verzending naar de tandtechnieker</li> </ul>	<b>900-2098</b> HS EuroSept® Max impression liquid 5l onverdund, 10 min.
<b>afval uit behandel-/onderzoekskamer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>huishoudelijk afval wordt op de gebruikelijke wijze aan de vuilnisophaaldienst aangeboden</li> <li>afval dat in contact is gekomen met bloed moet alvorens het in de vuilcontainer wordt gedeponeerd in een stevige plastic zak worden verpakt</li> <li>volle naaldencontainers worden beschouwd als afval met infectiegevaar en mogen niet bij het gewone afval worden aangeboden maar moeten bij het chemisch afval</li> <li>de inhoud van zeeffjes, afzuigunit en amalgamaafscheider wordt afgevoerd als chemisch afval</li> </ul>		
<b>kleding</b>	Zie wasvoorschrift kledinglabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>na gebruik</li> <li>na verontreiniging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>apparaat* .....</li> <li>wasprogramma* .....</li> <li>wasmiddel* .....</li> <li>dosering* .....</li> <li>* zelf in te vullen</li> </ul>

<b>hand- en hoekstukken</b>			
<b>reining en desinfectie buitenkant</b>	Reinig en desinfecteer de hand- en hoekstukken door ze af te nemen met alcohol. Gebruik hiervoor alcoholdoekjes of spraydesinfectie.	na elke patiënt	<b>900-2192</b> HS EuroSept® Max wipes <b>900-1291</b> HS EuroSept® Max surface
<b>desinfectie en sterilisatie binnen- en buitenkant</b>	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor de juiste desinfectie en sterilisatie procedures. Na sterilisatie of thermische desinfectie kan het hoekstuk worden geolied.	na elke patiënt	<b>900-1570</b> HS Maxima® oil spray 500ml <b>900-3292</b> HS S-spray 250ml

Voorafgaand aan het desinfectie- of sterilisatieproces moeten de instrumenten worden gereinigd, waarbij ook grote zorg moet worden gegeven aan de binnenzijde van holle voorwerpen. De binnenzijde kan met behulp van ragers of een water-drukpistool worden gereinigd. Na het reinigen moeten de instrumenten goed gedroogd worden!


instrumenten	stap 1	stap 2	stap 3	stap 4	product
<b>Categorie A</b> kritisch gebruik reiniging en verpakte sterilisatie Instrument wordt gebruikt voor: Invasieve ingrepen waarbij contact met steriel weefsel plaatsvindt.	Losse instrumenten moeten verpakt worden voordat ze in de stoomsterilisator worden geplaatst	Indien niet aanwezig een stuk indicatorstape aanbrengen. Met behulp van indicatorstrip (-tape) kan verarring met niet-gesteriliseerd instrumentarium worden voorkomen.	Voor het leeghalen van de stoomsterilisator, na voltooiing van het sterilisatieproces, de lading een half uur laten afkoelen en de handen wassen of inwrijven met handalcohol.	De gesteriliseerde instrumenten mogen nu maximaal 6 maanden bewaard worden op een schone, droge en stofvrije plaats (mits de verpakking niet is beschadigd). Plak een sticker met de datum van sterilisatie op de verpakking.	<b>900-1839</b> HS autoclaaftape <b>900-2983</b> HS self seal zakjes 89 x 254mm <b>900-2984</b> HS self seal zakjes 83 x 159mm <b>900-2985</b> HS self seal zakjes 134 x 280mm <b>900-2986</b> HS self seal zakjes 25,4 x 381mm
<b>Categorie B</b> semikritisch gebruik reiniging en thermische desinfectie of onverpakte sterilisatie Instrument wordt gebruikt voor: Ingrenen met aantoonbare risico's als gevolg van overdracht van micro organismen zoals tandsteen verwijderen, extracties en wortelkanaal-behandeling.	Indien er voor sterilisatie wordt gekozen, wordt de sterilisatie op dezelfde wijze uitgevoerd als sterilisatie van instrumenten van categorie A, alleen verpakken van de instrumenten is niet nodig.	Bij thermische desinfectie wordt gebruik gemaakt van een thermodesinfector voor reiniging en desinfectie in een proces.	Voor het leeghalen van de thermodesinfector de handen wassen of inwrijven met handalcohol.	De gedesinfecteerde instrumenten opbergen op een schone, droge en stofvrije plaats.	<b>900-1577</b> HS EuroSept® Thermo poeder 6kg <b>900-1576</b> HS EuroSept® Thermo Cleaner 5l <b>900-1575</b> HS EuroSept® Thermo Rinse 1l <b>900-1578</b> HS EuroSept® Neutralizer can 5l <b>900-2951</b> HS Thermo Tabs 50 st
<b>Categorie C</b> niet kritisch gebruik reiniging en thermische/chemische desinfectie Instrument wordt gebruikt voor: Ingrenen waarbij risico op overdracht m.o. zeer klein is zoals orthodontische-/ fluoridebehandeling of het maken van foto's.	Instrumenten van categorie C die ook voor categorie A en B worden gebruikt ook behandelen als categorie A of B.	Instrumenten die alleen voor categorie C worden gebruikt, worden bij voorkeur gereinigd en thermisch gedesinfecteerd in een thermodesinfector.	Indien thermische desinfectie niet mogelijk is, omdat instrumenten hier niet tegen kunnen, worden de instrumenten na huishoudelijke reiniging en goede droging chemisch gedesinfecteerd door onderdompeling gedurende 10 min. in een desinfectant, goed afspoelen met water, waarna ze aan de lucht worden gedroogd.	Voor het aanraken van de instrumenten eerst de handen wassen of inwrijven met handalcohol.  Het gedesinfecteerde instrumentarium wordt op een schone, droge en stofvrije plaats opgeborgen.	<b>900-1288</b> HS EuroSept® Max Bur 2l <b>900-1289</b> HS EuroSept® Max Bur 5l <b>900-2600</b> HS EuroSept® Max Instruments lemon 2l <b>900-2601</b> HS EuroSept® Max Instruments lemon 5l <b>900-2952</b> HS Ultra Tabs 50st

locatie Almere  
 Veluwezoom 16, 1327 AG Almere  
 Postbus 50351, 1305 AJ Almere  
 telefoon 036 53 58 601  
 fax 036 53 58 609  
 info@henryschein.nl



www.henryschein.nl

locatie Emmen  
 Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen  
 Postbus 138, 7800 AC Emmen  
 telefoon 0591 697 111  
 fax 0591 697 110  
 info@henryschein.nl

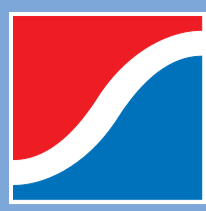

## desinfectie- en reinigingsplan voor de tandartspraktijk

volgens de WIP-richtlijn vastgesteld 10-2007

wat	hoe	wanneer	waarmee
	dosering, inwerktijd	frequentie	artikelnummer + product (zelf in te vullen)
<b>handhygiëne</b>			
<b>wassen (reinen)</b> Bij zichtbare verontreiniging de handen wassen met zeep. Anders de handen desinfecteren.	Onder stromend water en met vloeibare zeep uit een dispenser, zonder de kraan of dispenser met de handen aan te raken. ± 10 sec. goed wrijven tussen handen en over de polsen. Handen drogen met papieren wegwerphanddoek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ voor en na elke patiënt</li> <li>■ na het snuiten van de neus</li> <li>■ na hoesten en niezen</li> <li>■ na toiletgang</li> <li>■ voor het verwerken van gebruiksklaar instrumentarium</li> <li>■ na het verwerken van gebruikt instrumentarium</li> </ul>	
<b>desinfecteren hygienisch</b> Kost minder tijd dan handen wassen en is minder schadelijk voor de huid.	Met dispenser handalcohol aanbrengen op droge handen. Neem een hoeveelheid die het kuiltje van een handpalm vult. Wrijf de handen ± 30 sec. zorgvuldig over elkaar. Vergeet hierbij niet de vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ voor en na elke patiënt</li> <li>■ na het snuiten van de neus</li> <li>■ na hoesten en niezen</li> <li>■ na toiletgang</li> <li>■ voor het verwerken van gebruiksklaar instrumentarium</li> <li>■ na het verwerken van gebruikt instrumentarium</li> <li>■ voor en na elke maaltijd</li> </ul>	
<b>verzorging</b>	Zorgvuldig de hele hand inwrijven, goed de vingers en nagelriemen inmasseren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ eind van de dag</li> </ul>	

<b>oppervlakken</b>			
<b>grote oppervlakken en vloeren in onderzoek- en behandelkamer</b>	Zoveel mogelijk droog reinigen, zoals met behulp van een stofwisser. Eventuele vervuiling met tissue verwijderen voordat met een desinfectant gedesinfecteerd kan worden. De desinfectant aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bij zichtbare verontreiniging</li> <li>■ indien nodig</li> </ul>	
<b>kleine oppervlakken behandelstoel, hoekstukken, werkplekken, enz.</b>	Bij zichtbare verontreiniging eerst oppervlak reinigen met water en detergens. Daarna desinfecteren met 70% alcohol of een desinfectant. Gebruik alcoholdoekjes en voor de moeilijk bereikbare plaatsen een sprayflacon met desinfectiemiddel. Vergeet met name niet de handgrepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na gebruik</li> <li>■ na elke behandeling</li> <li>■ bij zichtbare verontreiniging</li> </ul>	

<b>speciaalreiniging</b>			
<b>afzuigslang (binnenkant) reinigen</b>	Spoel de slangen met ongeveer een halve liter (koud) water door.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na elke behandeling</li> </ul>	
<b>desinfecteren</b>	Laat de slangen een desinfectie- reinigingsmiddel opzuigen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 of 2 keer per dag (middag en avond)</li> </ul>	
<b>afzuigslang (buitenkant)</b>	Desinfecteren, reinigen door deze af te nemen met een desinfectiedoek of spraydesinfectie. De spraydesinfectie onverdund gebruiken en 2 minuten laten inwerken. U kunt ook gebruik maken van hygiënehoesjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na elke behandeling</li> </ul>	
<b>spittoon</b>	Doorspoelen met water en eventuele resten verwijderen. De spittoonreiniger 1 min. laten inwerken (onverdund) en nogmaals doorspoelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na elke patiënt</li> </ul>	
<b>filter</b>	Filter wisselen/reinigen. Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na gebruik</li> <li>■ na verontreiniging</li> </ul>	
<b>amalgamaafscheider</b>	Vervang de afscheider zodra de unit dit aangeeft of bij twijfel van goed functioneren. Vermijd direct contact met de huid, gebruik handschoenen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zodra de afscheider vol is</li> </ul>	
<b>afdrukken alginaat, silicone, hydrocolloid, etc.</b>	Reinigen; onder de lopende kraan afspoelen, overmaat water afschudden en aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ direct na het maken van de afdruk</li> <li>■ klaarmaken voor verzending naar de tandtechniek</li> </ul>	
Dit geldt ook voor o.a. prothese, brugwerken, beetregistraties of artikulatoren, gezichtsbogen etc.	Desinfectie en reiniging; afdrukken voor 10 min. in desinfectiemiddel onderdompelen. Na inwerktijd afspoelen onder de kraan, overmaat water afschudden en aan de lucht laten drogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ direct na het maken van de afdruk</li> <li>■ klaarmaken voor verzending naar de tandtechniek</li> </ul>	
<b>machinaalreinen</b>	Volg handleiding van de fabrikant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ direct na het maken van de afdruk</li> <li>■ klaarmaken voor verzending naar de tandtechniek</li> </ul>	
<b>afval uit behandel-/onderzoekskamer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ huishoudelijk afval wordt op de gebruikelijke wijze aan de vuilnisophalddienst aangeboden</li> <li>■ afval dat in contact is gekomen met bloed moet alvorens het in de vuilcontainer wordt gedeponeerd in een stevige plastic zak worden verpakt</li> <li>■ volle naaldencontainers worden beschouwd als afval met infectiegevaar en mogen niet bij het gewone afval worden aangeboden maar moeten bij het chemisch afval</li> <li>■ de inhoud van zeeffjes, afzuigunit en amalgaamscheider wordt afgevoerd als chemisch afval</li> </ul>		
<b>kleding</b>	Zie wasvoorschrift kledinglabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na gebruik</li> <li>■ na verontreiniging</li> </ul>	

<b>hand- en hoekstukken</b>		
<b>reiniging en desinfectie buitenkant</b>	Reinig en desinfecteer de hand- en hoekstukken door ze af te nemen met alcohol. Gebruik hiervoor alcoholdoekjes of spraydesinfectie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na elke patiënt</li> </ul>
<b>desinfectie en sterilisatie binnen- en buitenkant</b>	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor de juiste desinfectie en sterilisatie procedures. Na sterilisatie of thermische desinfectie kan het hoekstuk worden geolied.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ na elke patiënt</li> </ul>

Voorafgaand aan het desinfectie- of sterilisatieproces moeten de instrumenten worden gereinigd, waarbij ook grote zorg moet worden gegeven aan de binnenzijde van holle voorwerpen. De binnenzijde kan met behulp van ragers of een water-drukpistool worden gereinigd. Na het reinigen moeten de instrumenten goed gedroogd worden!

instrumenten	stap 1	stap 2	stap 3	stap 4	product
<b>Categorie A</b> kritisch gebruik reiniging en verpakte sterilisatie Instrument wordt gebruikt voor: Invasieve ingrepen waarbij contact met steriel weefsel plaatsvindt.	Losse instrumenten moeten verpakt worden voordat ze in de stoomsterilisator worden geplaatst	Indien niet aanwezig een stuk indicatortape aanbrengen. Met behulp van indicatorstrip (-tape) kan verwarring met niet-steriliseerd instrumentarium worden voorkomen.	Voor het leeghalen van de stoomsterilisator, na voltooiing van het sterilisatieproces, de lading een half uur laten afkoelen en de handen wassen of inwrijven met handalcohol.	De gesteriliseerde instrumenten mogen nu maximaal 6 maanden bewaard worden op een schone, droge en stofvrije plaats (mits de verpakking niet is beschadigd). Plak een sticker met de datum van sterilisatie op de verpakking.	
<b>Categorie B</b> semikritisch gebruik reiniging en thermische desinfectie of onverpakte sterilisatie Instrument wordt gebruikt voor: Ingrenen met aantoonbare risico's als gevolg van overdracht van micro organismen zoals tandsteen verwijderen, extracties en wortelkanaal-behandeling.	Indien er voor sterilisatie wordt gekozen, wordt de sterilisatie op dezelfde wijze uitgevoerd als sterilisatie van instrumenten van categorie A, alleen verpakken van de instrumenten is niet nodig.	Bij thermische desinfectie wordt gebruik gemaakt van een thermodesinfector voor reiniging en desinfectie in een proces.	Voor het leeghalen van de thermodesinfector de handen wassen of inwrijven met handalcohol.	De gedesinfecteerde instrumenten opbergen op een schone, droge en stofvrije plaats.	
<b>Categorie C</b> niet kritisch gebruik reiniging en thermische/chemische desinfectie Instrument wordt gebruikt voor: Ingrenen waarbij risico op overdracht m.o. zeer klein is zoals orthodontische-/ fluoridebehandeling of het maken van foto's.	Instrumenten van categorie C die ook voor categorie A en B worden gebruikt ook behandelen als categorie A of B.	Instrumenten die alleen voor categorie C worden gebruikt, worden bij voorkeur gereinigd en thermisch gedesinfecteerd in een thermodesinfector.	Indien thermische desinfectie niet mogelijk is, omdat instrumenten hier niet tegen kunnen, worden de instrumenten na huishoudelijke reiniging en goede droging chemisch gedesinfecteerd door onderdompeling gedurende 10 min. in een desinfectant, goed afspoelen met water, waarna ze aan de lucht worden gedroogd.	Voor het aanraken van de instrumenten eerst de handen wassen of inwrijven met handalcohol.  Het gedesinfecteerde instrumentarium wordt op een schone, droge en stofvrije plaats opgeborgen.	

locatie Almere  
 Veluwezoom 16, 1327 AG Almere  
 Postbus 50351, 1305 AJ Almere  
 telefoon 036 53 58 601  
 fax 036 53 58 609  
 info@henryschein.nl



www.henryschein.nl

locatie Emmen  
 Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen  
 Postbus 138, 7800 AC Emmen  
 telefoon 0591 697 111  
 fax 0591 697 110  
 info@henryschein.nl